



Aufbauanleitung hiiwi Lift

assembly instructions hiiwi elevator

Arbeiten Sie bei der Montage mit zwei Personen.

The assembly should be carried out by two people.

Notwendiges Material:

4 Dübel
4 Schrauben M8, min. 50 mm
Innensechskantschlüssel

Required material:

4 wall plugs
4 screws, M8, min. 50 mm long
Allen key



1

Packen Sie die Hubeinheit (Lift) aus. Platzieren Sie den Lift in aufrechter Position gegen die Wand, an der Sie ihn befestigen möchten. Sichern Sie den Lift gegen Umkippen, indem ihn eine zweite Person festhält.

Unpack the lifting unit (lift). Place the lift in an upright position against the wall to which you wish to attach it. The second person should hold the lift in place to prevent it from tipping over.

2

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Fahren Sie den Lift mithilfe der Fernbedienung ganz nach oben, so dass die Abdeckung vollständig sichtbar ist.

Connect the mains plug to a wall socket. Using the remote control, move the lift all the way up so that the cover is fully visible.

3

Entfernen Sie nun die vier äußeren Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab. Jetzt liegt die Wandhalterung frei.

Next remove the four outer screws and take off the cover. Now the wall bracket is exposed.

4

Halten Sie die gesamte Einheit direkt gegen die Wand und zeichnen Sie durch die vier Löcher in der Stahlkonstruktion (Durchmesser 8 mm) die Stellen für die Bohrungen in der Wand an. Über die höhenverstellbaren Füße kann der Lift präzise ausgerichtet werden. Dafür wird ein Innensechskantschlüssel benötigt.

Hold the entire unit directly against the wall and mark the locations for the mounting holes in the wall through the four holes in the steel structure (diameter 8 mm). The lift can be precisely aligned using the height-adjustable feet. This requires an Allen key.

5

Stellen Sie den Lift zur Seite und bohren Sie an den vier markierten Stellen die Löcher in die Wand. Für die Wandbefestigung werden vier ausreichend belastbare Schrauben mit einer Länge von mindestens 50 mm sowie je nach Untergrund (Wandkonstruktion) entsprechende Dübel benötigt.

Put the lift aside and at the four marked locations drill the holes in the wall. For wall mounting, four screws with a length of at least 50 mm and sufficient load-bearing capacity are required as well as corresponding wall plugs depending on the substrate (wall construction).

6

Stellen Sie den Lift nun wieder an seine Position und verschrauben Sie ihn mit der Wand.

Place the lift back into position and screw it to the wall.

7

Bringen Sie die Abdeckung wieder an und schrauben Sie sie mit den vorher entfernten vier Schrauben fest. Jetzt können Sie die Aufhängung nach unten fahren.

Replace the cover and tighten it with the four screws previously removed. Now you can move the support downwards.

8

Hängen sie nun den klappbaren Wickeltisch in die Halteschiene ein. Klappen Sie den Wickeltisch auf und schrauben Sie die Sicherungsschrauben hinein. Vergewissern Sie sich bitte, dass der Wickeltisch fest und sicher sitzt. Damit ist die Montage beendet.

In the next step attach the foldable changing table to the holding rail. Unfold the changing table and screw in the safety screws. Please make sure that the changing table is firmly and securely attached. This completes the assembly.